

E Etchgel

o-PHOSPHORIC ACID 36%

dental etching system

D L S DENTAL LIFE
SCIENCES

CONȚINUT

Setul include: o seringă ce conține 2,6 g, 6,5 g, 13 g sau 60 g din preparat sub formă de gel + vârfuri aplicatoare ETCHGEL

MD Dispozitiv medical clasa IIa

INDICAȚII DE UTILIZARE

ETCHGEL este utilizat pentru a crește aderența între dinți și restaurările compozite prin dizolvarea componentei minerale a dinților, crescând astfel rugozitatea suprafeței dintelui. Demineralizarea cu ajutorul ETCHGEL duce, de asemenea, la o creștere a energiei de suprafață, care îmbunătățește semnificativ umectabilitatea smalțului printr-un sistem adeziv. ETCHGEL este într-o formă de gel, care reduce un efect de demineralizare necontrolat al acidului fosforic asupra țesuturilor dure ale dinților. Forma de gel asigură, de asemenea, umiditatea constantă a suprafeței demineralizate și previne blocarea microcanalelor formate cu săruri de calciu care precipită în timpul procesului de demineralizare.

ETCHGEL poate fi utilizat pentru:

- obturatii fotopolimerizabile sau autopolimerizabile
- sigilarea fisurilor
- stabilizarea dinților: permanentă și temporară
- aparate ortodontice fixe,
- pregătirea suprafețelor metalice precum și restaurări acrilice și compozite, înainte de a utiliza materiale composite fotopolimerizabile

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Aplicați un strat subțire de ETCHGEL pe o suprafață curățată și uscată cu atenție. Se lasă pentru aprox. 30 s, clățiți cu un curent puternic de apă. Uscați bine până când smalțul este alb-mat. Repetați dacă smalțul nu a atins efectul mat sau dacă are loc contaminarea cu saliva. Nu demineralizați mai mult de 60 s.

COMPOZIȚIE

Substanță activă: acid o-fosforic 36%.

CONTRAINDICAȚII

Nu utilizați ETCHGEL la pacienții cu alergie cunoscută la oricare dintre componentele produsului.

REACTII ADVERSE

Nu se cunosc reacții adverse. Cu toate acestea, o reacție alergică nu poate fi exclusă la persoanele deosebit de sensibile. În cazul unei reacții alergice imediate, opriți utilizarea produsului.

LIMITĂRI DE UTILIZARE, INTERACȚIUNI

ETCHGEL poate dizolva liner-urile pe bază de ionomeri de sticlă.

PRECAUȚII

ETCHGEL conține 36% acid o-fosforic, care, în cazul unui contact prelungit, poate avea proprietăți corozive. În cazul contactului cu materialul sensibil la acid, suprafața contaminată trebuie clătită rapid sub un curent puternic de apă.

Evitați contactul cu pielea, ochii și țesuturile moi ale gurii. În cazul unui astfel de contact, clătiți cu multă apă timp de cel puțin 15 min. În caz de simptome, consultați un medic care oferă informații despre produs. Pentru a reduce riscul de contact, purtați întotdeauna echipament de protecție personală, cum ar fi mănuși, măști pentru față și ochelari de siguranță.

Pentru izolarea câmpului operator și protejarea pacientului, se recomandă utilizarea unui baraj de cauciuc.

Dacă înghițiți, nu induceți vărsături. Se recomandă să beți multă apă și să solicitați asistență medicală imediată.

În caz de aspirație în tractul respirator, solicitați asistență medicală imediată.

Pentru a evita uscarea ETCHGEL, preparatul trebuie îndepărtat de pe vârf trăgând înapoi pistonul seringii imediat după utilizare. ETCHGEL este destinat utilizării multiple, în timp ce aplicatorul este doar pentru o singură utilizare. Evitați contactul aplicatorului cu țesuturile pacientului. Dacă apar astfel de contacte, se recomandă înlocuirea aplicatorului.

AVERTIZĂRI



Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni ale ochilor.



A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a persoanelor neautorizate. Protejați produsul de căldură. A nu se îngheța. Utilizați în conformitate cu instrucțiunile producătorului. A nu se folosi după data de expirare.

DEPOZITARE

A se păstra la o temperatură sub 25°C.

Pentru utilizare numai de către stomatologi, tehnicieni dentari.

GARANȚIE

ARKONA va înlocui produsele care s-au dovedit a fi defecte sau vor rambursa prețul achiziției. ARKONA nu răspunde pentru nicio pierdere sau daună cauzată de utilizarea necorespunzătoare sau utilizarea necorespunzătoare a produsului.

Instrucțiuni de utilizare emise la 24.02.2020



ARKONA

Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej
Nasutów 99 C, 21-025 Niemce, EU



1639