

Pregătirea sub formă de lichid pentru irigare, clătirea și curățarea buzunarelor parodontale inflamate

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Scoateți capacul vârfului și înlocuiți-l cu aplicatorul pre-îndoit. Introduceți aplicatorul cu atenție într-un buzunar parodontal inflammat cât mai profund. Clătiți zona inflamată, apăsând încet pistonul seringii. Repetați procedura până când tot conținutul inflamator a fost eliminat. După procedură, recomandați pacientului să-și clătească gura cu apă.

Pentru a reduce durerea în timpul procedurii, încălziți ușor preparatul înainte de utilizare pentru ex. plasându-l în apă caldă.

INDICAȚII

- punji parodontale
- în jurul restaurărilor de clasa a II-a
- zone din jurul dinților cu erupție dificilă, în special molarul de 6 ani
- după proceduri de scalare și chiuretaj
- sub proteze și în jurul dinților care susțin bracket-uri
- zone aflate în restaurare, cum ar fi punji și coroane
- punji parodontale în jurul dinților destinate extracției
- zone din jurul aparatelor ortodontice

CONTRAINDICAȚII

Hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului.

REACTII ADVERSE

Nu există dacă preparatul este utilizat în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

INFORMATII SUPLIMENTARE

Pentru utilizare de către stomatologi și igienişti dentari. PERIOFLUSH nu trebuie utilizat pentru clătirea canalelor radiculare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a persoanelor neautorizate.

PERIOFLUSH poate fi utilizat la pacienții cu ulcer, diabet și la gravide. Nu provoacă dependențe sau complicații. Poate fi utilizat în funcție de nevoile individuale.

PRECAUȚII

Evitați contactul cu ochii. În cazul unui astfel de contact, clătiți cu multă apă și consultați un medic.


GARANȚIE

ARKONĂ va înlocui produsele care s-au dovedit a fi defecte sau vor rambursa prețul achiziției. ARKONĂ nu răspunde pentru nicio pierdere sau daună cauzată de utilizarea necorespunzătoare sau utilizarea necorespunzătoare a produsului.



COMPOSITION

Apa ozonată, nanocoloid de argint, nitrat de sodiu, arome, acid ortofosforic, acidul lactic.



Pungi
parodontale

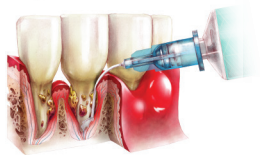



În jurul dinților cu opercul,
în special dinți de lapte

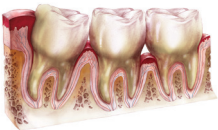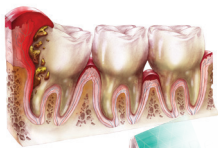

În cazul restaurărilor
precum punți și coroane

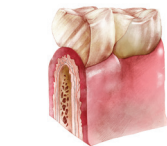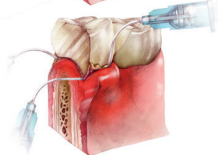

Spații interdentare fără puncte
de contact adecvate

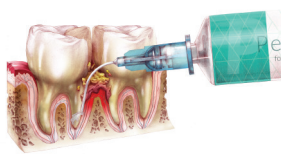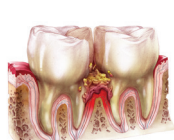

ARKONA

Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej
Nasutów 99 C, 21-025 Niemce, EU



D L S DENTAL LIFE
SCIENCES